

Art nr: **100737**

Artikel: **Ansiktsskydd avsedd för att skydda mot droppsmitta i vård och omsorg**

Material: **APET/Polyuretan**

Bulkpackade

1. Tag bort ev skyddsfolie, skjut igenom tandningen snett genom det rektangulära hålet.
2. Börja med att lägga fästet i nacken och dra sedan ner visiret över ansiktet.



Huvudomfång mellan 52-63cm. 24cm höjd.

Produkten kan rengöras med en mjuk trasa med alkoholbaserad lösning, rengöringen skall göras då produkten ej är i bruk, lägg ner det på en plan, ren yta och torka rent med trasan. Produkten byts ut om repor eller annan skada i synfältet uppstår. Den skall slängas i brännbart.

Produkten skall förvaras svalt/mörkt, (icke i direkt solljus).

Material som kommer i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner mot känsliga individer.

Produkten är märkt CE 100737 som anger att den är testad och godkänd enligt EN 166: 2001

EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden AB

Box 857, SE-50115 BORÅS Anmält organ nr 0402

Hänvisning till "Förordningen (EU) 2016_425" och "EU-försäkran om överensstämmelse 100737" hittar du på:

www.calinex.se/dokument

"Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare"